




Requisitos para la instalación de tu próxima unidad dental

Recuerda que toda instalación de unidad requiere:

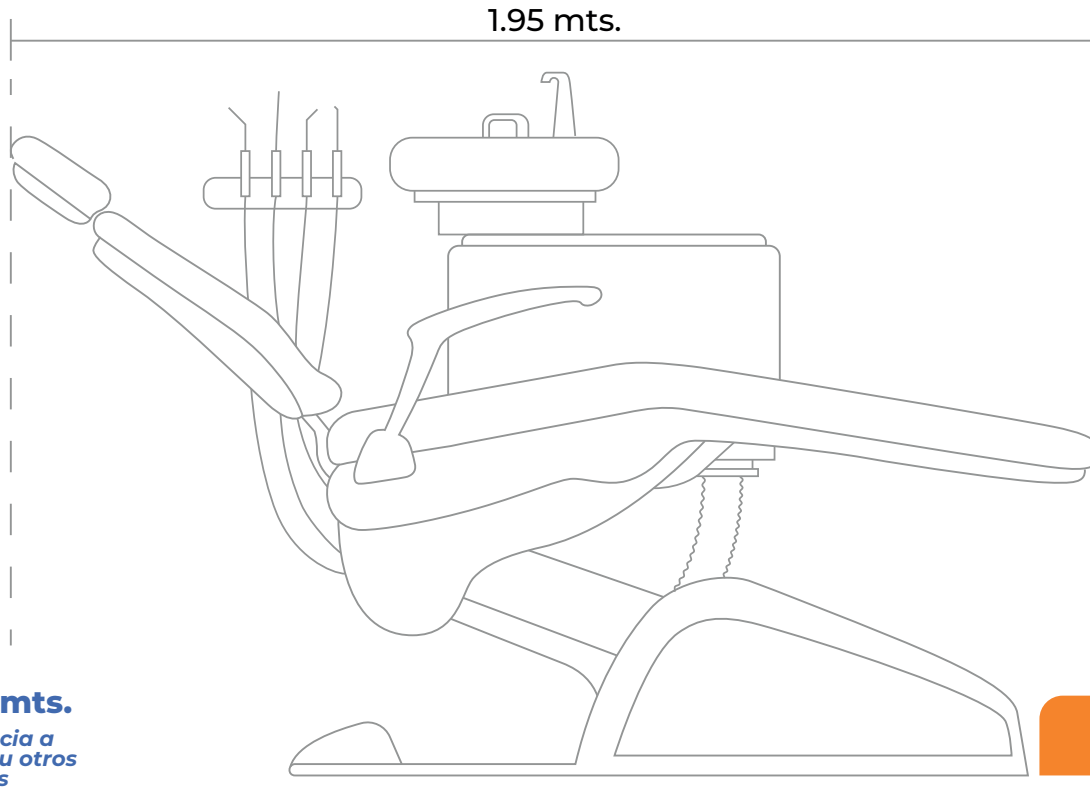

2.35 mts.

Distancia a pared u otros objetos

Las puertas de acceso deberán medir mínimo 90cm.
Las conexiones deberán de tener un espacio de pared u objetos un mínimo de 2.35mts. por cada lado.

Toma de electricidad (Contacto duplex aterrizado 110 Volts - 127v ac.)

1

Conexión hidráulica (agua de la calle o tinaco, válvula esfera 1/2" o rosca interna, con llave de paso con la cuerda interior)

2

Conexión neumática (aire del compresor con válvula esfera 1/2" o rosca interna, con llave de paso con la cuerda interior) presión mínima de 80 lb / sq in y máxima de 100 lb / sq in. (mínimo de 1/2 h.p. Con tanque de 40 lts.)

3

Conexión sanitaria 2 codos de 45° (Drenaje PVC sanitario 2", con un mínimo de 2% de declive)

4

Conexión a succión (con central de vacío 3/4" PVC hidráulico)

OPCIONAL

5

Espacio listo y libre para instalar

6

Regulador de voltaje de 1500 watts

7

Nota: Las conexiones es recomendable que estén a ras de piso para su mejor aspecto.

- **La puerta de acceso** para meter la unidad dental deberá tener mínimo 1 m. de ancho al igual que las escaleras de ser necesario.
- Tendrá un **cargo extra** el desinstalar otra unidad dental, en donde MDC queda exento de toda garantía de tal unidad.
- Tiene un **cargo extra por piso** el instalar unidades que no sean una planta baja.
- Si no se lleva a cabo la instalación en la primera visita, por cuestiones ajenas a la empresa la siguiente visita tendrá un **costo extra**.
- No nos hacemos responsables por daños a pisos, alfombras, techos, escaleras, ventanas por haber tenido que trasladar la unidad **a pisos superiores**.
- Si no se cumple las medidas mínimas para ingresar la unidad se tendrá un **cargo extra pesos por desarmar la unidad**.

Es de suma importancia respetar los espacios asignados para no tener inconvenientes en el proceso de instalación.

Tamaño real* y distancias de la pre-instalación

